

# 特注 踏み台

【材質:天然木／集成材】

段差のある玄関などの昇り降りを補助する踏み台です。

## 特殊な塗装で滑りにくい

- 表面に特殊な塗装をしてあり、滑りにくい仕上がりとなっています。


## 塗装色が3色から選べます

- 設置する場所に合わせて、クリア・ライトオーク・ダークの3色から選ぶことができます。
- 天板を滑り止めシートの仕様にすることも可能です。（Aタイプのみ）
- 無塗装品での製作も可能です。



※ 印刷物と実際の商品では、色・柄が多少異なります。

## 形状が選べます

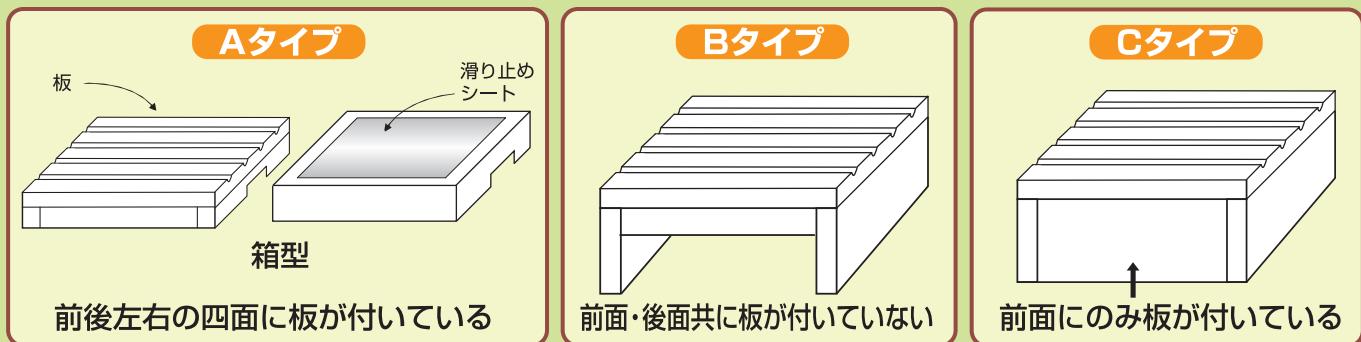

## その場所に応じた寸法で、単品から製作します

高さ・奥行き・幅・形状・塗装色（3色）



専用の用紙に寸法を記入するだけ、とても簡単です！



## 特注品製作の注意点


- 特注品の為、製作途中及び製作後のキャンセルはお受けできません。
- 見積り・ご注文は専用の用紙にご記入の上、お問い合わせ下さい。
- 塗装色は、クリア・ライトオーク・ダークの3色からお選び下さい。
- 台形、三角形、腰かけ台、その他の形状も製作できます。お問い合わせ下さい。
- オプションにて、裏面にゴムアジャスター又は、スポンジゴムを取り付できます。
- 天然木（集成材）を使用しておりますので、木目・色調・つなぎ目部分の色違いはご容赦下さい。

# 踏み台 施工例

変形や欠き込み等の特注も可能



Aタイプ 台形  
色：ライトオーク

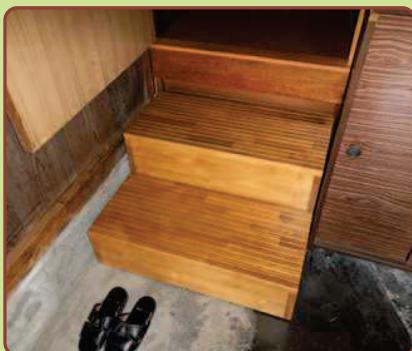

Aタイプ 2段形状  
色：ライトオーク



Aタイプ  
滑り止めシート／色：ライトオーク



Cタイプ 台形  
色：ライトオーク




規格踏み台 5535  
色：ライトオーク




規格踏み台 5530  
色：ライトオーク

## 固定方法

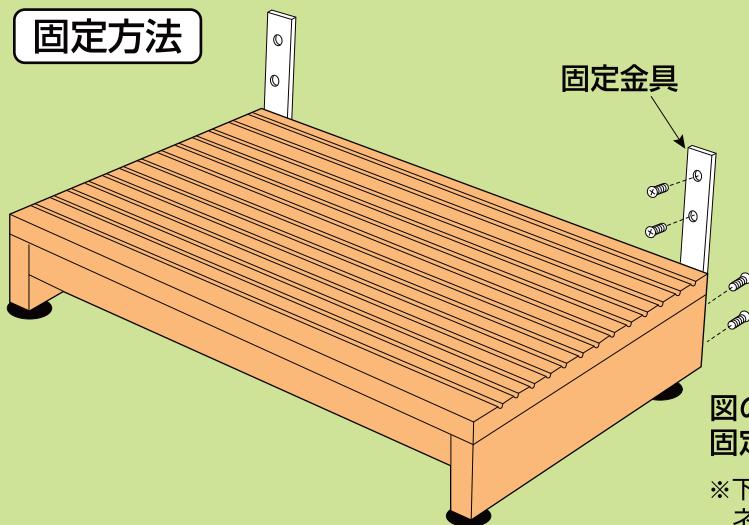

固定金具

## ゴムアジャスターで高さを調整する場合

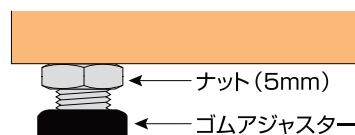

- 図のように付属のナットを入れてゆるまないように締めつけることもできます。
- ナットを使用の場合は、アジャスターの調整範囲が約10mmまでとなります。

図の位置に  
固定金具を取り付けて下さい。

※下穴(2mm)をあけてから  
ネジを締めて下さい。

## おことわり

- 屋外、水廻り、湿気の多い所、火気の近くでの使用は出来ません。
- 天然木及び集成材を使用しておりますので、木目・色調の多少の色違いは、ご容赦下さい。
- 大きさに応じて集成材を使用する為、つなぎ目部分に多少の色違いが出る場合があります。
- このカタログの商品写真の色は印刷物ですので、実際の商品とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様・価格等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

**BF** 有限会社バリアフリー静岡

〒420-0871 静岡県静岡市葵区昭府2丁目7番5号  
TEL (054) 205-9852  
FAX (054) 205-9854

バリアフリー静岡 検索

取扱店



# 木製 踏み台

取扱説明書（材質：天然木集成材 / 附属品：固定金具（ネジ付）×2）

この度は当社の製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。  
取扱説明書を読んで、よく理解してから取付けしてください。  
また、いつでもお読みいただけるよう、必ず保管して下さい。

## ⚠ 取付け上の注意

- 踏み台は、玄関框や壁面に当てて、ご使用下さい。
- 床面が平らな場所に設置して下さい。平らな場所ではない所に設置する場合は、オプションのゴムアジャスター指定で製作をして、高さの調整をして下さい。  
(約15mm調整可能・付属のナットをご使用の場合は約10mm調整可能)
- 段差や斜面には設置しないで下さい。
- 本体を設置した後、ガタツキがある場合は、すき間にスポンジゴム等を取付し、台を安定させて下さい。
- 屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所や火気の近くには設置しないで下さい。
- 固定金具（ステー）が1台に付き2本付いていますので、玄関框や壁面に固定して下さい。  
(踏み台への固定金具取付位置は、台の左右にそれぞれ下図のように取付して下さい)
- 取付場所が木製以外の材質の場合、付属の固定金具のネジでは取付できません。  
取付場所に応じた適切な固定方法をして下さい。
- 設置場所に付属の固定金具が合わない場合は、別途適切な固定金具をご用意していただき、台を固定して下さい。
- 強度的に不安定な場合は、取付時に必要な固定をして下さい。

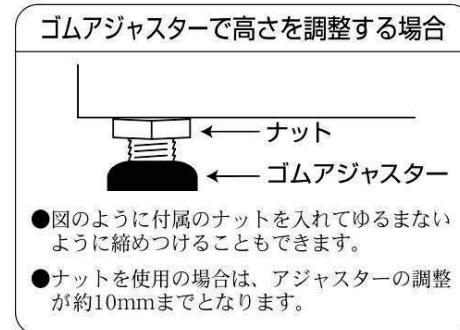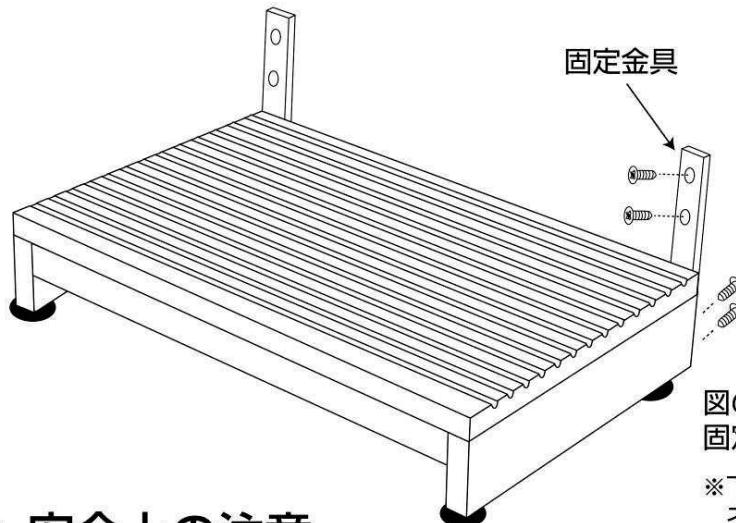

図の位置に  
固定金具を取付して下さい。

※下穴（2mm）をあけてから  
ネジを締め付けて下さい。

## ⚠ 安全上の注意

- 改造又は分解をしないで下さい。（破損の原因になります）
- 本体に勢いよく飛び乗ったりしないで下さい。
- その他の用途では使用しないで下さい。（子供を遊ばせるなど）
- 玄関マット等の上に設置したり、天板上に玄関マットを置かないで下さい。
- 滑り止め塗装をしてありますが、長年使用しますと、効果が薄くなってしまいます。  
その場合、市販の滑り止めテープを貼って、より安全にご使用して下さい。

## ■ その他

- 天然木を使用している為、木目・色調の多少の違いはご了承下さい。
- 通常のお手入れは、柔らかい布などで水拭きをして下さい。  
トイレ用洗剤、ベンジン、シンナー及びクレンザーや、ナイロンたわし等の使用は、  
本体を痛めますので、絶対に使用しないで下さい。
- 商品の仕様は、改良・改善の為に、予告なしに変更することがあります。

製品に関するお問い合わせ先

 有限会社バリアフリー静岡

〒420-0871 静岡県静岡市葵区昭府2丁目7番5号

TEL(054)205-9852(代) FAX(054)205-9854